




1. Ouvrez le champ stérile et déposez les différents composants dessus.




2. Mettez l'anticoagulant (CDA) dans les seringues à raison de 0.8 ml pour une seringue de 10 ml.



3. Montez le butterfly de prélèvement sur la première seringue, prélevez 10 ml.

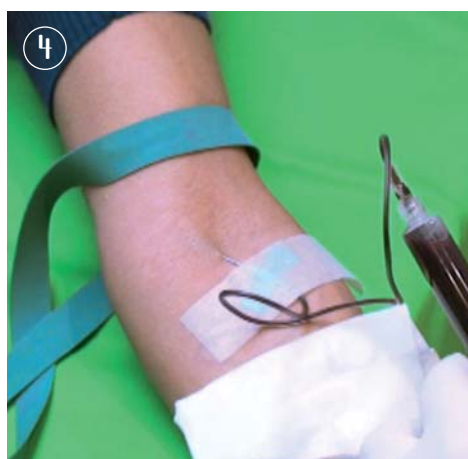

4. Pensez à retirer le garrot avant de changer de seringue. Prélevez 10 ml sur la 2^{ème} seringue.

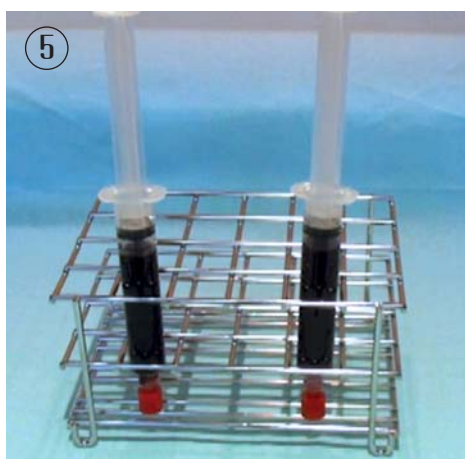

5. Obturez les seringues avec les bouchons Luer lock. Mélangez.



6. Centrifugez pendant 5 minutes à 700g (soit 2500 tours par minute).



7. Veuillez à garder le kit vertical, retirez délicatement le piston. A l'aide de l'aiguille 25G, prélevez les 3 ml de PRP au plus près du culot sans le toucher.



8. Montez l'aiguille 30G et injectez. Mêmes étapes pour la 2^{ème} seringue.

L'ECO-KIT P.R.P est un assemblage de plusieurs composants. Chaque produit a son propre marquage CE.